




Sementointioppaasi



Multilink® Automix

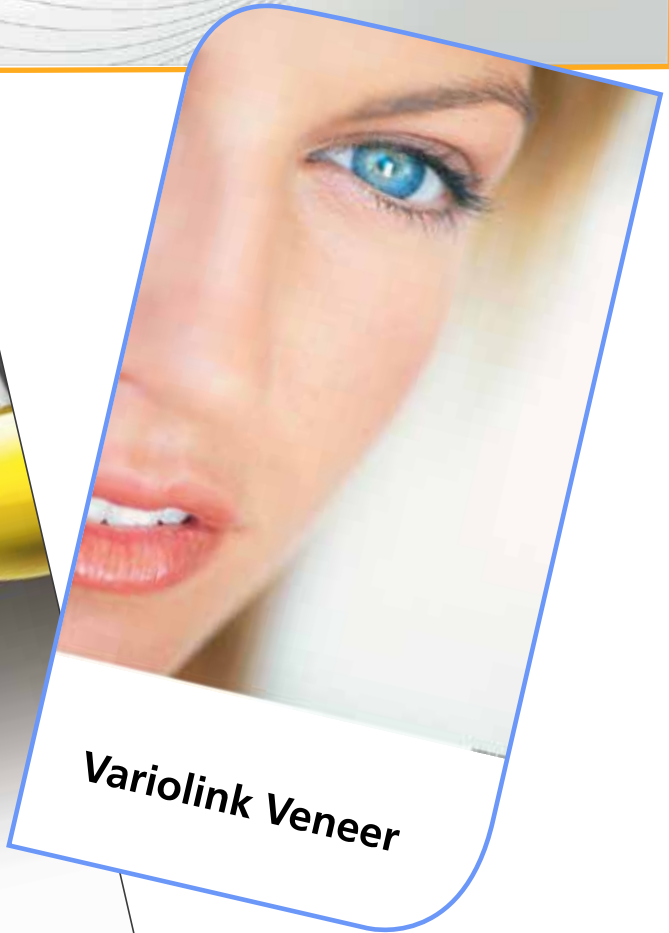

Variolink Veneer



Ivoclean

Ivoclean

Suun ulkopuolella käytettävä puhdistuspasta, joka puhdistaa tehokkaasti proteettisten rakenteiden sidostettavat pinnat suussa tehdyn sovituksen jälkeen. Tällä tavoin Ivoclean mahdollistaa optimaalisen adhesiivisen sidostamisen.



Monobond Plus

Yleisprimeri kaikille restauroimateriaaleille

- Helppo käyttää
- Yksi reaktioaika – 60 sek
- Voidaan säilyttää huoneenlämmössä



IPS Natural Die Material

Oikean hammasvärin löytämiseksi tarvitaan tieto myös preparoidun hampaan väristä. Tämä on helpointa määrittää IPS Natural Die Material-väriskaalalla. Hiotun pilarin väriä vastaavan väri-stanssin avulla hammasteknikko voi helposti simuloida preparoidun hampaan runkovärin.



Proxyl

Fluoriton profylaksiapasta jolla RDA 36 (medium), sisältää xylitolia.

UUTUUS



Mukana myös Liquid Strip

Kaikkeen sementointiin


Multilink® Automix NG

Kemiallisesti kovettava yleissementti, joka voidaan tarvittaessa valokovettaa.

Nyt uutuutena parannettu Multilink Automix "Next Generation". Multilink Automix -sementtiä käytetään yhdessä hampaalle tulevan kiille/dentiiniprimerin **Multilink Primer A/B** kanssa ja restauroitioon tulevan **Monobond Plus** -yleisprimerin kanssa. Röntgenkontrastia on kokonaiset 350% Al.

MIKSI?

Multilink Automix on sementti sinulle, joka haluat työskennellä yksinkertaisesti ja saada aikaiseksi erityisen korkeat sidosarvot. Tämä sementti vaatii sekä hammaspinnan että restauroitioon esikäsitteilyn. Tällä tavoin saat todella korkeat sidoslujuuudet kaikenlaisiin pintoihin, metalleihin ja keramiaan. Uusi Multilink Automix voidaan säilyttää **huoneenlämmössä.**

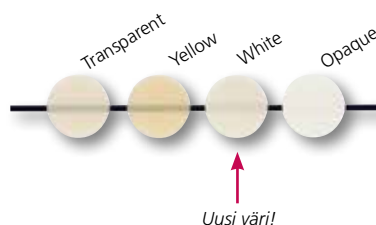

MITEN?

Jotta löydät oikean sementtivärin käytät uusia **Try-In väripastoja**. Sementoinnissa applikoit 30 sekunnin ajaksi Multilink Primer A/Bn. Esikäsitteile restauroitio valmistajan ohjeiden mukaisesti ja applikoi sen jälkeen Monobond Plus, jota voit käyttää kaikissa erityyppisissä restauroitioissa. Applikoi sitten sementti suoraan restauroitioon. Sementtiylimäärät on entistä helpompi poistaa "Easy Clean-Up" -neljän-nestekniikan avulla. Valokoveta ylimääräsementti 1-3 sekunnin* ajan jokaisessa hammasneljänneksessä. Ylimäärä muodostaa näin geelimäisen olomuodon ja se on helppo poistaa esim. sirpillä. Applikoi välittömästi tämän jälkeen Liquid Strip sementtisaumaan ja estät näin happi-inhibition tapahtumasta. Valokoveta lopuksi vielä kerran kaikki restauroitio sementtisaumat 20 sekuntia*, huuhtelee Liquid Strip pois. Viimeistele ja kiillota. Täydelliset ohjeet löydät käyttöohjeesta.

* aika riippuu käytettävästä valokovettajasta

Käyttöalueet:

- Metall- ja metallokeramia restauroitiot
- Kokokeraamit (IPS Empress Esthetic)
- Vahvistetut keraamit (zir-konium- ja alumiinioksidi, litiumdisilikaatti, esim. IPS e.max)
- Juurikanavanastat (metalliset tai lasikuituvahvistetut)

Sidosaine:
Multilink Primer A/B
itse-etsaava



Huippuesteettinen



Klassinen

Variolink® Veneer

Valokovetteinen resiinisementti täydelliseen estetiikkaan

Variolink Veneer-systeemissä on seitsemän eri väriä ja sovitusväriä. Sovitusväripastoja käyttämällä löydät oikean sementtivärin ohuille laminaateille.

MIKSI?

Variolink Veneer on sementti joka on tarkoitettu Sinulle, joka haluat korkeinta mahdollista estetiikkaa etualueen laminaattien sementointiin. Systeemissä on Try-In-pastat, joiden värit ovat yhtenevät sementtivärien kanssa. Transparentti on läpikuultava eikä se muuta laminaatin väriä ollenkaan. Värejä on lämpimistä (keltaiset) kylmiin (valkoiset), jotta löytäisit parhaat mahdolliset värisävyt laminaatteihin. Viskositeettia on optimoitu, jotta ylimäärien poisto olisi nyt entistä helpompaa.



Valkoisempi (kylmä)

Keltaisempi (lämmin)

HV+3 HV+2 HV+1 MV 0 LV-1 LV-2 LV-3



MITEN?

Sovitat laminaatin Try-In-pastan kanssa löytääksesi oikean värisävyyn. Esikäsittele restauration pinta valmistajan ohjeiden mukaisesti ja applikoi **Monobond Plus**. Hampaan preparoitu alue happoetsataan ja applikoidaan ExcITE F -sidosaaine. Sementti laminaattiin ja sen laitto paikoilleen, valokovetus 1-2 sekuntia, ylimäärien poisto ja lopuksi koko fasadialueen valokovetus. Täydelliset ohjeet löydät käyttöohjeesta.

Käyttöalueet:

- Ohuet fasadit, inlayt ja onlayt keramiasta tai yhdistelmämuovista

Sidosaine:
Suosituksemme on Syntac tai ExcITE F

Variolink® II

Klassikkosementti jo usean vuoden ajan!

Variolink II on kaksoiskovetteinen yleisresiinisementti, jolla katat kaikki tarpeesi keraamien kiinnittämisessä. Täydelliseen kovettumiseen tarvitaan valokovetus. Valikoimassa on kuusi eri väriä ja sovitusväriä.

MIKSI?

Kun haluat käyttää helppoa ja esteettisesti luotettavaa sementointisysteemiä. Voit valita katalysaattorin kahdesta eri konsistenssista. Jos haluat käyttää vain valokovetteista sementtiä käytät vain Base-pastoja.



White opaque

Brown

Yellow

White

Transparent

Bleach XL



MITEN?

Sovitat ensin restauration Try-In -pastalla valitaksesi oikean värisävyyn. Esikäsittele restauration pinta valmistajan ohjeiden mukaisesti, applikoi sitten **Monobond Plus** ja sidosta ExcITE F DSC:llä. Fosforihappoetsaa preparoitu hammas, applikoi sen jälkeen sidosaaine ExcITE F DSC ja laita Variolink II restaurationiin. Sitten 1-2 sekunnin valokovetus, poista ylimäärät ja valokoveta koko restaurationi. Täydelliset ohjeet löydät käyttöohjeesta.

Käyttöalueet:

- Keraamit: inlayt, onlayt, kruunut ja sillat
- Yhdistelmämuovi-inlayt, -onlayt ja lasikuituvahvistetut juurikanavanastat/sillat

Sidosaine:
Suosituksemme on Syntac tai ExcITE F DSC

Universal

ITSESIDOSTUVA YLEISSEMENTTI

Implant

IMPLANTTISEMENTTI



Helppoa



Implanteille



SpeedCEM

Itsesidostuva yleissementti

Nopeaan ja helppoon sementointiin silloin kun hampaaseen on tehty perinteinen hionta. Soveltuu myös kruunujen, siltojen sementoimiseen ja implanttidistansseihin.

MIKSI?

SpeedCEM on helpompi käyttää kuin muut tavalliset sementtimme. Se korvaa fosfaatti- ja lasi-ionomeerisementit. Fosforihappoetsausta tai sidostamista ei tarvita. Sementti sekoitetaan suoraan automix-ruiskusta ja on valmis käytettäväksi.

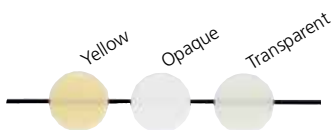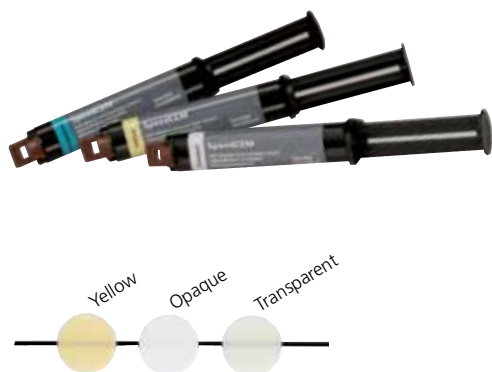

MITEN?

Esikäsittele restauration pinnat ohjeiden mukaan. Kun restauration on käsitelty annostelee SpeedCEM restaurationiin. Valokoveta sekunnista-kahteen jokainen neljännes. Ylimäärät muuttuvat geelimäiseen muotoon ja ne on helppo poistaa esim. sirpillä. Täydelliset ohjeet löydät käyttöohjeesta.

Käytetään yhdessä **Mono-bond Plus** kanssa **IPS e.max Press/CAD**-restaurationioiden sementoinnissa.

SpeedCEM-sementointi **ei** onnistu IPS Empress-restaurationioiden kanssa!

Indikaatiot

- Metalli- ja metallokeramia restaurationit
- Vahvistetut keraamit (zirkoniumoksidi, litiumdisilikatti, alumiinioksidi)
- Juurikanavanastat (metalli - set- ja lasikuituvahvisteiset)
- Perinteisesti hiotuille luonnonhampaille/implanttidistanssit (oksidikeramiasta/metallista)

Multilink® Implant



Implanttidistansseille kehitetty erikoissementti

Kemialliskovetteinen yhdistelmämuovisementti, jossa on valokovetusmahdollisuus. Koostumus on suunniteltu implanttologiassa käytettävien erilaisten materiaalien sementoimiseen.

MIKSI?

Multilink Implantia käytetään yhdessä uuden Monobond Plus yleisprimerin kanssa. Sen avulla:

- Aikaansaadaan vahva ja pitkäaikainen sidos materiaalista riippumatta
- Ylimäärien poistaminen on helppoa "Easy Clean-Upin" ansiosta
- 3 eri väriä jotka sopivat implanttirestaurationeihin

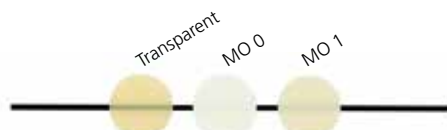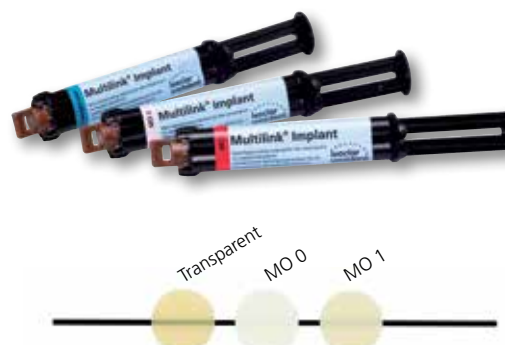

MITEN?


Esikäsittele distanssin ja restauration pinta valmistajien ohjeiden mukaisesti ja applikoi sen jälkeen niihin Monobond Plus primeri. Annostelee Multilink Implantia automixruiskusta suoraan restaurationiin. Valokoveta ylimäärät sekunnista-kahteen jokainen neljännes, poista ylimäärät.

Täydelliset ohjeet löydät käyttöohjeesta.

Indikaatiot

- Metalleista, metallokeramiasta ja kokokeramiasta tehtyjen epäsuorien restaurationioiden (kruunut ja sillat) adhesiivinen sementointi implanttidistansseille
- Yksittäisten distanssien sementointi titaanirunkoon


IPS e.max Preparaatio

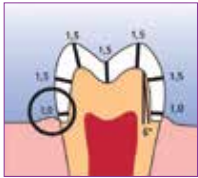


Taka-alueen kruunu



Onlay

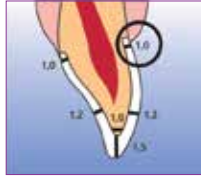


Etualueen kruunu

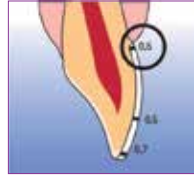

Fasadi



Table Top

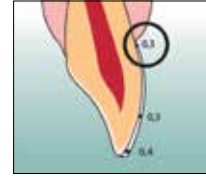


Ohuet laminaatit


IPS Empress Preparaatio




Taka-alueen kruunu

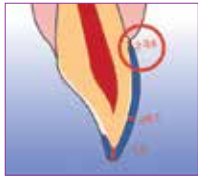

Fasadi

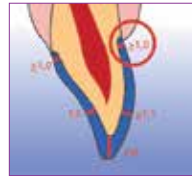

Etualueen kruunu

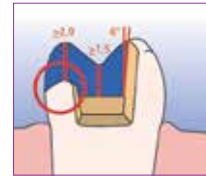

Onlay (myös e.max)



Inlay (myös e.max)

IPS e.max[®]

“KERROSTAEN TAI
PINTASÄVYTTÄEN –
TULOS ON
HÄMMÄSTYTTÄVÄ.”

Seppo Kärkkäinen, hammasteknikko, Suomi



IPS e.max Scientific Report

The IPS e.max Scientific Report Vol. 01 (2001–2011) is now available at: www.ivoclarvivadent.se/sv/science

Valitse sementti erilaisiin tarkoituksiin

Löydä oikea sementtisi sementtinavigaatiojärjestelmällä (Cementation Navigation System), jonka löydät osoitteesta: <http://www.cementation-navigation.com>
Tai tilaa oma CD osoitteesta info@ivoclarvivadent.se

Kaksi sementtiä, jotka täyttävät kaikki tarpeesi

Muut sementit

Sementti	Multilink Automix Kemialliskovetteinen, jossa mahdollisuus valokovettamiseen	Variolink Veneer Valokovetteinen	Variolink II Valo-/kaksoiskovetteinen	SpeedCEM Kemialliskovetteinen, jossa mahdollisuus valokovettamiseen
Kovettumismenetelmä:				
Sementointimenetelmä:	Sidosaine: Multilink Primer A/B Itse-etsaava	Sidosaine: Syntac tai ExcITE F Total Etch	Sidosaine: Syntac tai ExcITE F DSC Total Etch	Sidosaine: Perinteinen Itse-etsaava
Metalli/metallipohjainen Inlay tai onlay	✓	–	–	✓
Kruunut/sillat	✓	–	–	✓
Juurikanavanastat	✓	–	–	✓
Maryland-silta	✓	–	–	–
Leusiittivahvistettu lasikera- mia esim. IPS Empress Inlay/onlay	✓	✓	✓	–
Laminaatit	–	✓	✓	–
Kruunut	✓	–	✓	–
Litiumdisilikaatti (LS₂) Leusiittivahvistettu lasikera- mia Ohuet okklusaalilaminaatit	–	✓	✓	–
Ohuet laminaatit	–	✓	✓	–
Inlay tai onlay	✓	✓	✓	–
¾-kruunut	✓	–	✓	–
Kruunut	✓	–	✓	✓
3-osainen silta	✓	–	✓	✓
Oksidikeraamiset (Zirkonium/Alumiini) Kruunut tai sillat	✓	–	–	✓
Juurikanavanastat	✓	–	–	✓
Epäsuorat yhdistelmämuovit Inlay/onlay	✓	✓	✓	–
Kruunut	✓	–	✓	–
Juurikanavanastat	✓	–	✓	✓

✓ Suositeltava tuoteyhdistelmä

– Ei suositella

EDUSTAJAT

Clinical

Pia Herrmann-Rajala
gsm 040 589 88 39

Clinical

Katriina Kursi
gsm 040 75 75 650

Technical

Mikko Lindfors
gsm 040 519 41 41

Technical

Reijo Heinonen
gsm 040 511 59 90

JÄLLEENMYYJÄSI CLINICAL

Hammasväline Oy

Puh: 010 588 61 00

www.hammasvaline.fi

Plandent Oy

Puh: 020 77 95 200

www.plandent.fi

JÄLLEENMYYJÄSI TECHNICAL

Hammasväline Oy

Puh: 010 588 64 00

www.hammasvaline.fi

Plandent Oy

Puh: 020 77 95 200

www.plandent.fi

www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent AB

Dalvägen 14 | SE-169 56 Solna | Puh: +46 8 514 93 930 | Fax: +46 8 514 93 940 | info@ivoclarvivadent.se

